



Gebrauchsanweisung für das NuLids® System

V230907



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Inhalte korrekt sind, übernimmt NuLids, LLC. keine Verantwortung für etwaige Fehler, Auslassungen oder Ungenauigkeiten.

KONTAKTINFORMATIONEN



Adresse:	Für Produktunterstützung
NuLids UG Werner-Heisenberg-Str. 5 52477 Alsdorf www.NuLids.de	E-Mail: info@nulids.de

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch und sehen Sie sich die weiteren Informationen auf der Homepage www.NuLids.de sorgfältig durch, bevor Sie das NuLids System verwenden.


Beachten Sie insbesondere die Kapitel über Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

SYMBOLBESCHREIBUNG



Achten Sie immer auf Informationen, die mit den Worten VORSICHT oder WARNUNG und einem Warnzeichen gekennzeichnet sind.

	WARNUNG	Das Signalwort WARNUNG macht Sie auf mögliche schwere Verletzungen aufmerksam.
	VORSICHT	Das Signalwort VORSICHT macht Sie auf mögliche leichtere Verletzungen aufmerksam.
		Gefahr eines elektrischen Schlags.
		Nicht wiederverwenden.
		Trocken halten.
		"EIN/AUS" (Bedienelement).
		Siehe Gebrauchsanweisung.
		Setzen Sie das Handstück keinem direkten Sonnenlicht aus.
		Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.
		Haltbarkeitsdatum

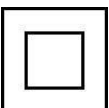		Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
		Seriennummer
		Datum der Herstellung.
		Anwendungsteil Typ B
		Hersteller
		Lot-/Chargennummer
		Katalognummer
		Doppelte Schutzisolierung
		Temperaturbereich
		Luftfeuchtigkeitsbereich
		Atmosphärischer Druck

Das NuLids System ist für die Verwendung in allen Einrichtungen vorgesehen, einschließlich häuslicher Einrichtungen und solcher, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, welches Gebäude versorgt, die für häusliche Zwecke genutzt werden. [Klasse B CISPR 11].

Dieses Benutzerhandbuch enthält Richtlinien für die Verwendung des NuLids® Systems von NuLids, LLC. Es wurde in der Annahme verfasst, dass die im Starter Kit enthaltene Kurzanleitung ebenfalls gelesen wurden.

INHALTSVERZEICHNIS

KONTAKTINFORMATIONEN	1
INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT	1
SYMBOLBESCHREIBUNG	2
PRODUKTÜBERSICHT	5
INDIKATIONEN FÜR DIE VERWENDUNG	6
KONTRAINDIKATIONEN FÜR DIE VERWENDUNG	6
VORSICHTSMAßNAHMEN	7
WARNUNGEN	7
WARNUNGEN (FORTSETZUNG...)	8
AUFLADEN DES NULIDS HANDSTÜCKS	9
TÄGLICHER BETRIEB - ANWEISUNGEN FÜR VERWENDUNG	10
WICHTIGE HINWEISE ZUM TÄGLICHEN BETRIEB	11
FÜR BESTE ERGEBNISSE	12
PFLEGE DES NULIDS SYSTEMS	13
RECYCLING UND ENTSORGUNG	13
SPEZIFIKATIONEN	14
FEHLERSUCHE	15
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	15
GARANTIE	16
URHEBERRECHT	17

PRODUKTÜBERSICHT

Das NuLids System ist eine Behandlung, die von Patienten oder Pflegepersonal zu Hause durchgeführt werden kann:

- a) Reinigen und Massieren der Augenlider
- b) Patienten, bei denen die ersten Anzeichen einer Trockenen Auge Erkrankung festgestellt werden.

Das NuLids Starter-Kit besteht aus den folgenden Teilen:

- Wiederaufladbares Handstück (Abbildung 1)
- Netzteil (Abbildung 2, ähnlich)
- Ladekabel (Abbildung 3)
- 30 NuLids Soft Tips zur Einmalanwendung (Abbildung 4)
(Typ B Anwendungsteil)
- Revitalisierendes Augenlidgel
- Kurzanleitung



Abb. 4 Soft Tip

INDIKATIONEN FÜR DIE VERWENDUNG

Das NuLids System ist eine klinisch erprobte, sichere und wirksame, schnelle, einfache und kostengünstige Möglichkeit zur Reinigung und Massage der Augenlider zu Hause. NuLids ist ein natürlicher Weg, um das allgemeine Erscheinungsbild und den Komfort der Augen zu verbessern.

KONTRAINDIKATIONEN FÜR DIE VERWENDUNG

NuLids sollte nicht bei Patienten bei Augenherpes, offenen Wunden, anderen aktiven Augeninfektionen oder innerhalb von 90 Tagen nach einer Augenoperation verwendet werden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob NuLids für Sie geeignet ist, fragen Sie Ihren Augenarzt, bevor Sie das System verwenden.

Verwenden Sie das NuLids Gerät nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.

VORSICHTSMAßNAHMEN



VORSICHT

	NuLids wird in der Regel einmal pro Tag angewendet, es sei denn, Ihr Arzt empfiehlt etwas anderes.
	NuLids ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Teilen Sie das Handstück oder einen Soft Tip nicht mit anderen Personen.
	Betreiben Sie gute Hygiene. Waschen Sie Hände und Gesicht, bevor Sie das NuLids System verwenden.

WARNUNGEN



WARNUNG

	Das NuLids System ist NUR zur ÄUSSERLICHEN ANWENDUNG .
	Verwenden Sie NuLids NICHT ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt, wenn Sie vor kurzem eine Augen- oder Augenlidoperation hatten oder Tätowierungen in diesem Bereich bekommen haben.
	Verwenden Sie nur von NuLids zugelassene Soft Tips. Die Verwendung von anderen Produkten, die nicht von NuLids stammen, führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
	Verwenden Sie jeden Soft Tip NUR EIN MAL . Die Wiederverwendung von Soft Tips birgt ein Infektionsrisiko, kann Ihr Gerät beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie. Zu Beginn jeder täglichen Behandlung muss ein neuer Soft Tip angebracht werden.
	Verwenden Sie NuLids NICHT WEITER , wenn Sie unerwünschte Wirkungen (Hautausschlag, Schwellungen, Brennen, Blutergüsse, Reizungen oder erhöhte Empfindlichkeit) feststellen. Andernfalls kann es zu weiteren unerwünschten Wirkungen kommen.
	Stecken Sie das NuLids Handstück während des Ladens NICHT in irgendeine Art von Tasche o. ä.


WARNUNGEN (FORTSETZUNG...)

	Setzen Sie den Soft Tip NICHT direkt auf das geöffnete Auge, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.
	Verwenden Sie NuLids NICHT auf anderen Stellen als auf die Augenlider.
	Schütteln Sie das NuLids Handstück NICHT , lassen Sie es nicht fallen und werfen Sie es nicht. Andernfalls kann die Garantie erlöschen.
	Versuchen Sie NICHT , das NuLids Handstück zu öffnen. Andernfalls erlischt die Garantie.
	Bewahren Sie das NuLids System und das Ladegerät IMMER an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur auf.
	Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um die Komponenten zu schützen.
	Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts NICHT mit Gewalt in eine Steckdose. Dies kann den Stecker des Ladegeräts oder die Steckdose beschädigen und zu schweren Verletzungen oder tödlichen Stromschlägen führen.
	Verwenden Sie den Ladestecker oder das Ladekabel NICHT , wenn sie beschädigt sind. Wenn in diesem Zustand verwendet wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder tödlichen Stromschlägen führen.
	Lassen Sie das NuLids-Ladekabel oder den Ladestecker NICHT mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und laden Sie es nicht mehr auf, da dies zu einem elektrischen Schlag oder einer Beschädigung des Produkts führen kann. NICHT mit den NuLids baden oder duschen. Legen Sie den NuLids, das Ladekabel oder das Netzteil so ab, dass es NICHT ins Wasser fallen oder gezogen werden kann. Berühren Sie NICHT das Wasser, wenn das Gerät mit Ladekabel oder Ladestecker eingesteckt ist und ins Wasser gefallen ist, da dies zu schweren Verletzungen oder tödlichen Stromschlägen führen kann.
	Warnung vor Strangulierung: Kinder können sich mit Schnüren strangulieren. Bewahren Sie dieses Ladekabel daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
	Gefahr des Verschluckens. Kleine Teile von Kindern und Haustieren fernhalten.

AUFLADEN DES NULIDS HANDSTÜCKS

Laden Sie das Handstück *vor dem ersten Gebrauch* vollständig auf, bis das grüne Licht dauerhaft leuchtet.

Während des Ladevorgangs blinkt das Licht grün. Das Blinken hört auf, wenn das Gerät vollständig aufgeladen und für den ersten Gebrauch bereit ist.

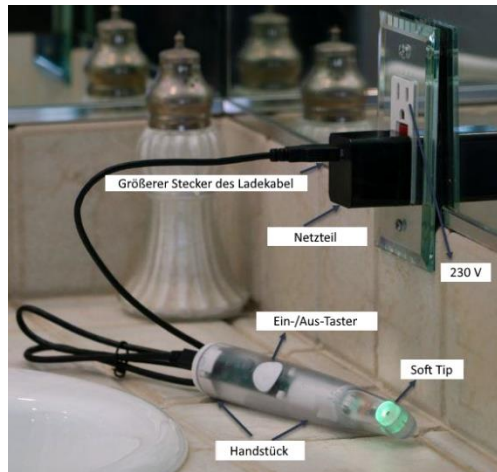

Ein gelbes Licht blinkt, wenn die Batterie schwach ist. Wenn dies zu Beginn einer Behandlung der Fall ist, reicht die Energie noch aus, um die Behandlung zu beenden. Laden Sie Ihr Handstück anschließend vollständig auf.


Eine vollständige Aufladung ist für den ordnungsgemäßen Betrieb des Handstücks nicht zwingend erforderlich. Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 4 Stunden.

Wenn der Ladevorgang länger als 5 Stunden dauert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Handstück vor. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an NuLids.

Hinweis: Die interne Batterie hat eine typische Lebensdauer von 300 bis 500 Ladezyklen.

Laden Sie Ihr NuLids **NICHT** in der Nähe von Wasser auf. Andernfalls besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder eines **TÖDLICHEN ELEKTRISCHEN SCHLAGS**.

Verwenden Sie Ihr NuLids Handstück **NICHT** und laden Sie es nicht auf, wenn Sie eines der folgenden Probleme haben:

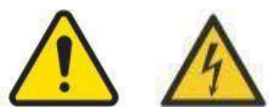

- Das Handstück fühlt sich heiß an.
- Das Handstück schaltet sich nach dem vollständigen Aufladen nicht ein.
- Das Handstück wird nicht geladen.

TÄGLICHER BETRIEB - ANWEISUNGEN FÜR VERWENDUNG

EMPFOHLENE BEHANDLUNGSMETHODE: Gleichzeitige Behandlung der unteren und oberen Augenlider.




1. Trennen Sie das NuLids-Handstück über den Stecker des Ladegeräts von der Steckdose. Wenn es angeschlossen ist, funktioniert das Handstück nicht.
2. Hände und Gesicht waschen.
3. Nehmen Sie einen neuen, unbenutzten Soft Tip aus der Verpackung.
4. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Handstück, so dass das weiße Licht aktiviert wird.
5. Bringen Sie den Kopf des Handstücks nahe an den Soft Tip, bis er magnetisch „einrastet“.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Soft Tip gut im Kopf des Handstücks sitzt.
7. Tragen Sie ein dickflüssiges Gleitgel auf den Soft Tip in der 12-Uhr-Position auf.
WICHTIG: Wenn Sie einen Schaum, ein Spray oder ein Öl verwenden, tragen Sie das Produkt nicht auf den Soft Tip auf. Tragen Sie das Gleitmittel stattdessen direkt auf das geschlossene Augenlid und/oder den Lidrand auf.
8. Halten Sie das Handstück in Ihrer dominanten Hand und experimentieren Sie, um die bequemste Handposition zu finden.
9. Schließen Sie ein Auge und platzieren Sie die Kante des Soft Tips vorsichtig an der Berührungslinie von Ober- und Unterlid.
10. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Handstück zu starten. Die grüne LED-Leuchte am Kopf des Handstücks leuchtet auf und der Soft Tip oszilliert.
11. Bewegen Sie den oszillierenden Soft Tip langsam mit gleichmäßigem Druck 30 Sekunden lang von einer Ecke des Augenlids zur anderen. Das Handstück pausiert nach jedem 15-Sekunden-Intervall und beginnt erneut, um Ihnen eine Orientierung zu geben, wann die 30 Sekunden beendet sind.
12. Wechseln Sie zum gegenüberliegenden Auge und behandeln Sie es 30 Sekunden lang auf die gleiche Weise.
13. Drücken Sie die danach Ein/Aus-Taste, um das Handstück auszuschalten.
14. Entfernen und entsorgen Sie den gebrauchten Soft Tip. **Diesen niemals mit anderen Personen teilen oder wiederverwenden.**

WICHTIGE HINWEISE ZUM TÄGLICHEN BETRIEB

1. Das Handstück macht in Abständen von 15 Sekunden eine Pause. Die Pausen dienen dazu, einen Richtwert der Behandlungszeit für jedes Augenlid zu erhalten. Setzen Sie dann die Behandlung am nächsten Augenlid fort.
 - a) Empfohlene Behandlungsmethode: 30 Sekunden pro Auge und Tag.
2. Nach den ersten Behandlungen kann es zu einer vorübergehenden Rötung, Wärmeempfinden und/oder einem leichten Stechen auf den Augenlidern kommen. Das ist normal. Sollte die Reizung jedoch anhalten, wenden Sie sich an einen Fachhändler oder Augenarzt vor Ort.
3. Wenn Sie Beschwerden am Auge selbst bemerken, brechen Sie die Behandlung ab und wenden Sie sich an einen Augenarzt.

FÜR BESTE ERGEBNISSE

1. Waschen Sie Ihr Gesicht und entfernen Sie eventuell vorhandenes Augen-Make-up vor der Behandlung.
2. Benutzen Sie während einer NuLids-Behandlung einen Spiegel, um die Platzierung der Soft Tips zu kontrollieren, bis Sie mit dem Verfahren vertraut sind.
3. Testen Sie evt. einen Soft Tip an einer anderen Hautpartie, bevor Sie ihn auf den Augenlidern anwenden, wenn Sie unsicher sind, wie Ihre Augenlider auf den Soft Tip reagieren werden. Führen Sie die Behandlung nur durch, wenn Sie sie vertragen.
4. Üben Sie moderaten und angenehmen Druck aus und gleiten Sie mit dem Soft Tip langsam über die Lidränder.
5. Bewegen Sie die oszillierende Spitze in einer langsamen über die Augenlider hin und her.
6. Üben Sie leichten, gleichmäßigen Druck auf die geschlossenen Augenlider aus. Verwenden Sie sanfte, gleichmäßige Bewegungen.
7. Probieren Sie aus, wie Sie das NuLids Handstück am bequemsten halten können. Gängige Methoden:

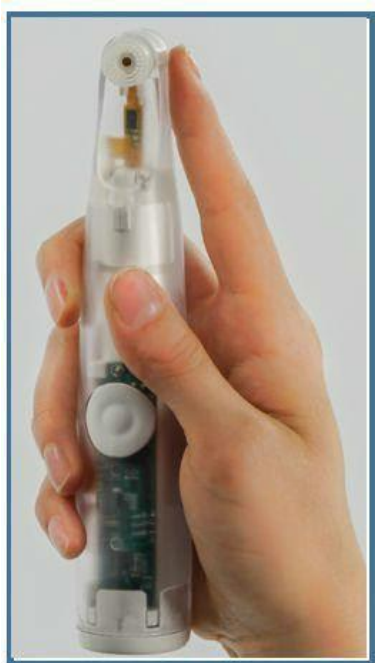

PFLEGE DES NuLIDS SYSTEMS

Die Pflege Ihres NuLids Systems ist einfach. Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Bewahren Sie Ihr NuLids Handstück, das Netzteil und das Ladekabel an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur auf. Vermeiden Sie dort direkte Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie das Handstück für eine sichere und effektive Anwendung sauber.
- Entfernen Sie zuerst den Soft Tip. Verwenden Sie dann ein sauberes Wattepad oder ein mit sauberem Wasser angefeuchtetes weiches Tuch, um das NuLids-Handstück zu reinigen.
- Tauchen Sie das Handstück NICHT in Wasser ein und spülen Sie es nicht unter dem Wasserhahn ab. Dadurch würde die Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen.

RECYCLING UND ENTSORGUNG

Der Akku ist nicht austauschbar. Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften, um die richtige Entsorgungsmethode zu bestimmen.

SPEZIFIKATIONEN

Haltbarkeitsdauer

Die Leistung eines Akkus lässt mit der Zeit nach, auch wenn er über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert wird. Außerdem kann sich die Lebenserwartung des Akkus verkürzen oder das Gerät, in dem der Akku verwendet wird, beschädigt werden, wenn sich die verschiedenen Einsatzbedingungen wie Laden, Entladen, Umgebungstemperatur usw. nicht innerhalb der angegebenen Bereiche bewegen. Wenn ein Akku seine Ladung nicht über längere Zeit aufrechterhalten kann, selbst wenn er korrekt geladen wurde, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass es Zeit ist, den Akku zu wechseln.

Anforderungen an die Lagerung

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lagern Sie das Gerät dann an einem kühlen und trockenen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Lagerung und Transport

Temperatur	-25°C (-13°F) bis 60°C (140°F)
Luftfeuchtigkeit	< 75%
Druck	700 – 1069hPa

Umweltschutzmaßnahmen

Temperatur	10°C (50°F) bis 35°C (95°F)
Luftfeuchtigkeit	30% bis 75%
Druck	700 – 1069hPa
Höhe	0 – 3048m

FEHLERSUCHE

Wenn sich das NuLids-Handstück nicht einschalten lässt, muss es möglicherweise neu aufgeladen werden. Siehe "Aufladen des NuLids Handstücks".

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Besuchen Sie die folgende Website mit einem internetfähigen Gerät:

<https://nulids.de/faqs/>

GARANTIE

Für Ihr NuLids System wird für einen Zeitraum von einem Jahr nach dem ursprünglichen Kaufdatum garantiert, dass es bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt nur für den Originalkauf und nur, wenn Sie das NuLids System bei einem zum Verkauf autorisierten Anbieter erworben haben.

Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit defekt werden, sollten sich Kunden mit Sitz in den USA an NuLids Customer Solutions unter 833-368-5437 wenden, um eine Reparatur oder einen Ersatz zu erhalten. Kunden außerhalb der USA sollten sich an ihren autorisierten Händler wenden.

NuLids behält sich das Recht vor, ein defektes Produkt durch das vergleichbarste derzeit verfügbare Produkt zu ersetzen.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die durch folgende Umstände beschädigt wurden:

- Unfall, unsachgemäßer Gebrauch, Missbrauch oder Modifikation
- Wartung durch Unbefugte
- Eintauchen in eine beliebige Flüssigkeit
- Wiederverwendung der Soft Tips
- Verwendung mit nicht zugelassenem Zubehör
- alle anderen Bedingungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

NULIDS IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ERGEBEN. ALLE GARANTIEEN, EINSCHLISSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN FÜR EIGNUNG UND MARKTGÄNGIGKEIT, SIND AUF EIN JAHR AB DEM URSPRÜNGLICHEN KAUFDATUM BESCHRÄNKT.

**DIE GARANTIE GILT UNABHÄNGIG VON DEN GESETZLICHEN GEWÄHRL-
EISTUNGSRECHTEN.**

URheberrecht

NuLids, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Anpassung oder Übersetzung ohne vorherige Genehmigung ist verboten.

