

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Brechen Sie die Behandlung ab und konsultieren Sie Ihren Augenarzt, wenn nach der ersten Woche Beschwerden auftreten und diese länger als 10 Minuten anhalten.

Soft Tips bitte **NICHT** wiederverwenden. Entsorgen Sie sie nach jeder Behandlung, um Infektionen oder Verletzungen zu vermeiden. An diesen können sich bei mehrfachem Gebrauch Bakterien und anderweitige Erreger sammeln!

Teilen Sie einen NuLids Soft Tip **bitte NIEMALS** mit einer anderen Person.

Halten Sie das Handstück trocken und frei von Flüssigkeiten.

Die vollständige Gebrauchsanweisung finden Sie unter: www.NuLids.de

Setzen Sie den Soft Tip **bitte NIEMALS** direkt auf Ihr Auge oder etwas anderes als die Augenlider.

Führen Sie die Behandlung **NICHT** häufiger oder über einen längeren Zeitraum aus, als empfohlen.

WEITERE INFORMATIONEN

Besuchen Sie www.NuLids.de, um:

- die Gebrauchsanweisung herunterzuladen,
- Videos zum Thema "Verwendung von NuLids" anzusehen, oder
- mit uns in Kontakt zu treten.



Mit dem Smartphone scannen, um weitere Informationen zu erhalten.



Import/Vertrieb durch:
mimado UG
Werner-Heisenberg-Str. 5
52477 Alsdorf

NuLids®

KURZANLEITUNG



SCHRITT 1: DAS HANDSTÜCK AUFLADEN

Vor der ersten Verwendung: Laden Sie das Handstück bitte solange auf, bis die LED dauerhaft grün leuchtet.

Zukünftige Verwendung: Laden Sie das Handstück bitte immer dann auf, wenn die LED orange blinkt. Das Handstück ist vollständig geladen, wenn die LED aufhört grün zu blinken oder diese ganz ausgeht.

SCHRITT 2: VORBEREITUNG FÜR DIE ANWENDUNG

- Entfernen Sie eventuell vorhandenes Make-up an den Augen und waschen Sie sich Ihre Hände.
- Drücken Sie bitte einmal die „Ein/Aus-Taste“ am Handstück. Die LED leuchtet dann weiß.
- Richten Sie die Öffnung oben an der Spitze des Handstücks so aus, dass der Zapfen des Soft Tips magnetisch gehalten wird. Stellen Sie sicher, dass der Soft Tip sicher am Handstück sitzt.



- Tragen Sie einen Tropfen NuLids® Revitalizig Gel wie folgt auf die Vorderseite des Soft Tips auf.
- Sollten Sie einen **Schaum, ein Spray oder ein Öl** verwenden (bitte beachten Sie unbedingt unsere Empfehlungen oder eine Empfehlung Ihres behandelnden Arztes und nutzen Sie keine anderen Mittel!), tragen Sie es nicht auf den Soft Tip, sondern stattdessen direkt auf das geschlossene Augenlid und/oder den Lidrand auf.



SCHRITT 3: ANWENDUNG



- Schließen Sie das zu behandelnde Auge.
- Setzen Sie den Soft Tip am Schnittpunkt von Ober- und Unterlid am Wimpernkranz bzw. Lidrand an.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Handstück.
- Bewegen Sie den oszillierenden Soft Tip langsam und mit gleichmäßigem Druck für 30 Sekunden von einer Seite des Lids zur anderen.
- Wechseln Sie dann auf das Auge und wiederholen Sie die o. g. Vorgehensweise für weitere 30 Sekunden am zweiten Auge.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Handstück, um es auszuschalten.
- Entsorgen Sie den gebrauchten Soft Tip.

Empfehlungen:

Benutzen Sie einen Spiegel, bis Sie sich mit der Platzierung des Soft Tips auf dem Auge sicher fühlen.

Achten Sie vor der Behandlung darauf, wo Sie die Vorderseite des Soft Tips platzieren.

Trennen Sie vor der Behandlung das USB-Kabel vom Handstück.

Probieren Sie aus, wie Sie das NuLids® Handstück am bequemsten halten können.

Halten Sie mit dem Soft Tip stets Kontakt mit Wimpernkranz und Augenlidrand, um beste Ergebnisse zu erzielen.